

BRUKERVEILEDNING

URIN OVERFØRINGSSENHET



Overføringsenhet



Vakuurrør m/konisk bunn,
med eller uten borsyre



Vakuurrør m/rund bunn,
med eller uten borsyre



1 Bland urinen godt og overfør den til vakuurrøret så snart som mulig etter prøvetaking. Senk det hvite røret på overføringsenheten ned i urinen.



2 Sett vakuurrøret ned i den gule enden av overføringsenheten og trykk det ned slik at korken på røret perforeres av nålen i overføringsenheten og urinen suges inn i røret.



3 Trekk vakuurrøret ut av overføringsenheten når det er fylt med riktig mengde (når det ikke er mer vakuum igjen i røret).



4 Dersom vakuurrøret inneholder borsyre (for mikrobiologiske undersøkelser), må urin og borsyre blandes ved å vende vakuurrøret opp-ned minimum 5 ganger.