






Kortfattet brukerveiledning

VACUETTE® SikkerhetsVenePrøveSett




-  for pasienter med "vanskelige" årer
-  kanylen trekkes rett fra venen og inn i sikkerhetsmekanismen
-  aktivering av sikkerhetsmekanismen indikeres med lyd
-  transparent vindu muliggjør visuell kontroll av blodstømmen

Rørholder, luer-adapter og vinger: ulike plastmaterialer
 Kanyle: rustfritt stål
 Gummiventil: syntetisk gummi

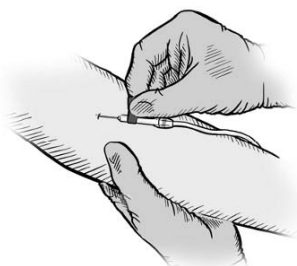

Utfør venepunksjonen med pasientens arm rettet nedover.

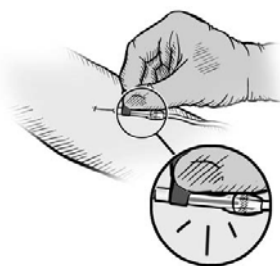

Vellykket venepunksjon bekreftes ved at blodet blir synlig i et transparent vinduet umiddelbart. Vingene kan om ønskelig festes med plaster.



Etter endt prøvetaking, holdes en gas- eller bomullsdott forsiktig over innstikkstedet (ikke trykk) med en hånd. Hold fast en av vingene med en av fingrene på den samme hånden. Aktiver sikkerhetsmekanismen med den andre hånden ved å presse inn sidene på midtstykket mellom kanyle og slange.



Trekk kanylen forsiktig ut av venen og inn i sikkerhetsmekanismen til det høres et "klikk", samtidig som gas- eller bomullsdotten presses ned mot innstikkstedet. "Klikket" er et tegn på at sikkerhetsmekanismen har blitt aktivert på en korrekt måte.

Aktivering av sikkerhetsmekanismen (detaljert):

