

CerviBrush+ Profile LBC – Cervical Sampler & CerviBrush+ LBC (Endocervical Sampler)

NCA-0422-02A, NCA-0780-01A, NCA-0780-02A

En enhet med bustlignende fremspring designet for å ta livmorhalsbiopsi fra et mistenkelig område, eller fra synlige lesjoner utenfor livmorhalsen, oppdaget under vaginal undersøkelse, for å oppnå en vevsdiagnose hos kvinner med intraepitelial sykdom. Den føres inn i skjeden, hvorpå børstehodet roteres godt over det aktuelle området, til det er dekket med en blodig mukoidprøve. Noen typer kan også ha mindre bust på et sentralt fremspring, som samtidig føres inn i livmorhalskanalen. Prøven sikres i en cytologifiksingsløsning, eller smøres på et objektglass for Papanicolaou-test (PAP). Enheten er kun til engangsbruk.

For profesjonell bruk.

Oppbevares tørt. Oppbevar ikke i direkte sollys. Må ikke brukes ved skadet emballasje.

Se utløpsdato på produktetiketten.

Bruksanvisning

1. Fjern plastrøretsom beskytter LBC-hodet og kast det. [Pic 1].
2. Sett LBC-en forsiktig inn i livmorhalskanalen og roter en halvpart helt rundt, slik at det tas ut nok til prøve. [Pic 2].

VED TYNNPREP-BRUK:

Skyll CerviBrush+ i hetteglasset ved å skyve busten mot flaskens vegger for å frigjøre cellene. For å frigjøre flere celler, snurres børsten rundt. Kast deretter børsten og send flasken til laboratoriet. Isoler celler fra preservativet og overfør til glassplate. Kast flasken.

VED SUREPATH-BRUK:

Fjern CerviBrush+, bryt av børstehodet og putt det i cytoprøveflasken. Send prøven til laboratoriet. Sentrifuger flasken for å skille celler fra preservativ og overfør celler til glassplate. Kast flasken og CerviBrush+-hodet.

KONVENsjONELL BRUK:

Fjern CerviBrush+ og klargjør utstrykningen ved å rulle og vri børsten på en ren og merket glassplate [Pic 3]. Ved behov kan mer enn én glassplate klargjøres før børsten kastes. Utstrykningspreparatet bør fikseres umiddelbart med CytoFix eller lignende fiksativ. [Pic 4].

STERILISERING:

Hvis det er behov for prøver for mikrobiologisk undersøkelse (f.eks. klamydia), kan CerviBrush+ steriliseres med etylenoksid. Dette er likevel kun tiltenkt engangsbruk, hvorpå den kastes etter forberedelse av utstrykningen.

FORSIKTIGHET:

IKKE bruk for utstrykningsprøve av endometrium.

IKKE bruk ved antatt eller bekreftet graviditet. Bruk Aylesbury eller en konvensjonell spatel.

Kast tom flaske i samsvar med lokale retningslinjer eller retningslinjer fra myndighetene.

IKKE BRUK DETTE PRODUKTET PÅ NYTT.

Enhver alvorlig hendelse som oppstår i forbindelse med enheten, må rapporteres til produsenten og kompetent myndighet i medlemsstaten rukeren og/eller pasienten befinner seg i.

