

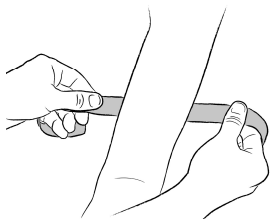
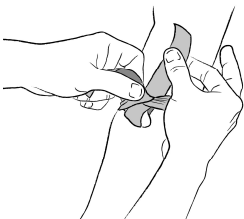
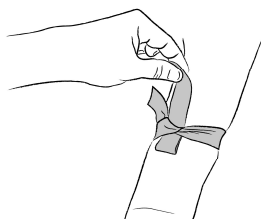
Tiltenkt bruk

VACUETTE® engangsstasebånd brukes i rutinemessig blodprøvetaking for å legge trykk på armen og gjøre blodårene mer fremtredende og lettere å føle og finne. Produktet skal bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til disse instruksjonene.

Produktbeskrivelse

VACUETTE® engangsstasebånd er laget av syntetisk gummi. Det er ikke brukt naturgummilateks i produksjonen, for å forebygge allergier og hudirritasjon. De forhåndsperforerte delene kan enkelt rives av etter behov.

Håndtering

			
1 Plasser stasebåndet 7,5-10 cm over punksjonsstedet.	2 Vikle VACUETTE® engangsstasebåndet rundt armen, slik at trådene krysser hverandre	3 Stikk den øverste tråden under det kryssede stasebåndet for å lage en løkke, uten å trekke enden	4 Når blodet strømmer inn i det første røret, løsner du stasebåndet ved å trekke den høyre enden i en oppadgående

Hvis et stasebånd har vært påført i mer enn 1 minutt før tilgang til venen, skal det løsnes og settes på igjen etter 2 minutter før venepunksjonen utføres.¹

Forholdsregler/forsiktighetsregler

- Ikke stram så hardt at det svekker den arterielle blodstrømmen til ekstremiteten.
- Løsne stasebåndet så snart blodet begynner å strømme inn i røret.
- For lang og for høy stase kan bidra til hemolyse.
- Må ikke brukes på skadet hud.
- Kast stasebåndet umiddelbart etter bruk, og ikke bruk det på nytt.
- Gjenbruk av engangsstasebånd kan føre til sykdom for pasienten på grunn av krysskontaminering.

Gjelder kun for EU-land: Skulle det oppstå alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, må disse rapporteres til produsenten og den relevante myndigheten i landet der brukeren/pasienten holder til.

Oppbevaring

Oppbevaringstemperatur: opptil 25 °C. Oppbevares beskyttet mot direkte sollys.

Avfallshåndtering

Kasseres i henhold til institusjonens retningslinjer.

Etikettinformasjon

	Produsent		Beskyttes mot sollys	MD	Medisinsk utstyr
	Utløpsdato		Høyeste temperaturgrense	CH REP	Autorisert representant i Sveits
LOT	Batchkode		Må ikke brukes på nytt	UK REP	Ansvarlig person i Storbritannia
REF	Katalognummer		Se bruksanvisningen		

Litteratur:

¹CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Østerrike

Produksjonssted:

Manufacturing facilities of Surge Industrial Co., Ltd., 4th Fl. No. 258,
Sec. 3, Beishen Road
Shenkeng District, New Taipei City 22204, Taiwan,
Distribuert av Greiner Bio-One GmbH, Østerrike

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tlf.: +43 7583 6791



Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen, Sveits



Greiner Bio-One Ltd, Brunel Way, Stroudwater Business
Park, GL10 3SX U.K. Stonehouse, Gloucestershire,
Storbritannia

